

GENERAL GUIDELINES FOR USE:

Easy Screen™

CLEANING WIPE




1. Always dispense wipe through lid. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the canister lid. Pull through about one inch. Replace lid.

Siempre dispense limpiante por la tapa. Quite la tapa, retire el sello interno y deséchelo. Localice el centro del rollo de toallitas; retuerza el vértice de la toallita para formar una punta y hágala pasar por el orificio de la tapa del bote. Jale aproximadamente una pulgada hacia afuera. Vuelva a colocar la tapa.



2. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. **When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.**

Cubra la mitad de la abertura con una mano. Retire la toallita de un tirón, en dirección contraria a la cara y a los ojos. Cuando no esté usando las toallitas, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de la humedad.

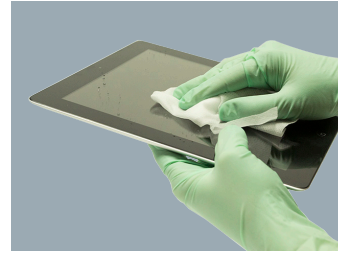

3. Gently wipe equipment surface to remove dirt and grime from touch screen.

Limpie suavemente la superficie del equipo para eliminar la suciedad y la suciedad de la pantalla táctil.



4. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash, or in accordance with local regulations for infectious waste disposal. Do not flush in toilet.

No vuelva a utilizar la toallita. Bote a la basura la toallita usada o deséchela de acuerdo con las reglamentaciones locales para la eliminación de residuos infecciosos. No la tire por el inodoro.



6850 Southbelt • Caledonia, MI 49316

1-800-835-1995 • www.hopkinsmedicalproducts.com

Hopkins
Since 1945 Medical Products™